



Instructies voor correct gebruik nitril handschoenen

1. Was altijd eerst uw handen met water en zeep,

2. Doe uw handschoenen zonder uw handen nog vuil te maken (raak niets aan)

3. Instructies voor het uitdoen van de gebruikte handschoenen

 <p>1 NEEM DE BUITENKANT VAN DE HANDSCHOEN BIJ DE POLS VAST ZONDER DAARBIJ DE HUID TE RAKEN</p>	<p>1. Neem de buitenkant van de handschoen bij de pols vast, zonder daarbij de huid aan te raken</p>
 <p>2 TREK DE HANDSCHOEN BINNENSTEBUITEN UIT</p>	<p>2. Trek de handschoen binnenstebuiten uit</p>
 <p>3 VOUW DE HANDSCHOEN TOT EEN BAL OP EN HOU HEM IN DE ANDERE (GEHANDSCHOENDE) HAND VAST</p>	<p>3. Vouw de handschoen tot een bal op en hou hem in de andere (gehandschoende) hand vast</p>
 <p>4 SCHUIF DE (WIJSVINGER ONDER DE RAND VAN DE NOG AANWEZIGE HANDSCHOEN (BINNENZIJDE)</p>	<p>4. Schuif de wijsvinger onder de rand van de nog aanwezige handschoen (binnenzijde)</p>
 <p>5 WIKKEL AF VANUIT DE BINNENZIJDE</p>	<p>5. Wikkel af vanuit de binnenzijde</p>
 <p>6 MAAK VAN DE HANDSCHOEN EEN ZAK VOOR BEIDE HANDSCHOENEN</p>	<p>6. Maak van de handschoenen een zak voor beide handschoenen</p>

	<p>7. Werp de handschoen in een daarvoor bestemde afvalzak</p>
<p>AFVAL</p>	<p>- Gooi de gebruikte handschoenen bij restafval, in een gesloten vuilbak</p>